

Wellead Tracheostomy Tube Holder

품목명: 의료 기구용 클립

품목 허가번호: 수신 23-1437호

사용 목적


인체조직을 제외한 의료기기 등을 일시적으로 고정하거나 잡아주기 위해 사용하는 기구.
단, 단순히 접착력만으로 부착하는 테이프 형태의 제품(반창고)은 제외한다.

사용 방법

가. 사용 전 준비사항

제품의 파손 여부를 확인한다.

나. 사용 방법

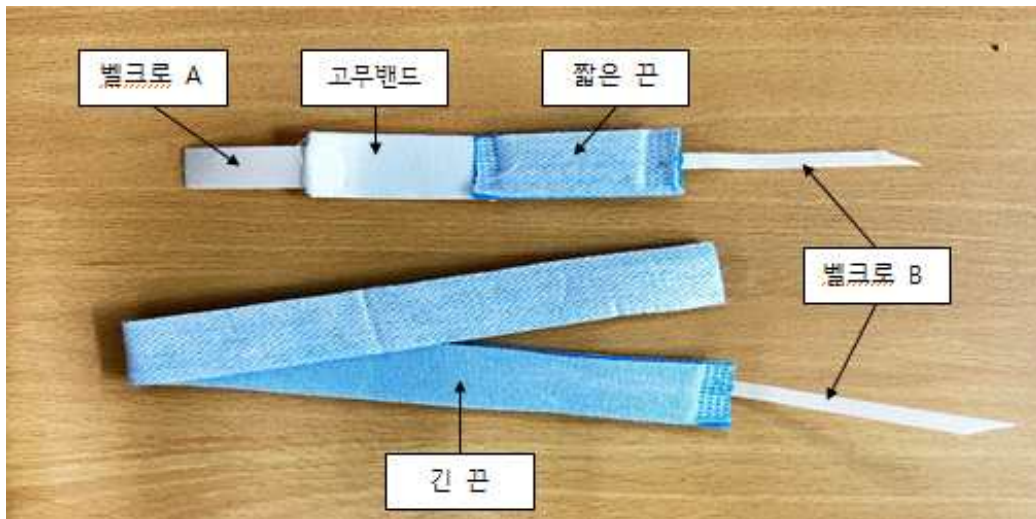

1. 벨크로 A를 긴 스트랩(끈)에 부착하여 환자의 목둘레를 측정하고 적절한 크기를 결정한다.
2. 벨크로 B를 기관절개 튜브의 한쪽에 끼워 스트랩(끈)에 고정한다.
3. 연결된 스트랩을 환자의 목뒤로 가져와 다른 벨크로 B를 기관절개 튜브의 다른 쪽에 연결해 스트랩을 고정한다.

다. 사용 후 처리 및 관리 방법

일회용 제품이므로 사용한 제품은 폐기한다.

사용 시 주의사항

- 1) 손상된 제품은 사용하지 않는다.
- 2) 사용법을 충분히 숙지 후 사용한다.
- 3) 직사광선을 피해 건조하고 서늘한 곳에 보관한다.
- 4) 일회용 제품으로 재사용하거나 재처리하지 않는다.

보관방법

직사광선을 피해 건조하고 서늘한 곳에 보관한다.

기타사항

- 제품명, 품목명, 모델명
 - 품목명 : 의료기구용클립
 - 제품명 : Wellead Tracheostomy Tube Holder
 - 모델명 : A04D030710
- 포장단위 : 1PCS/1BAG
- 제조회사, 제조국 : Well Lead Medical Co., Ltd , China
- 수입업자 상호, 주소 및 연락처
: (주) 홍은메디칼 – 서울시 광진구 자양로 176 홍은 빌딩 501호
: Tel. 02) 455-4011/ Fax. 02) 455-4018
- 부작용 보고 관련 문의처 : 한국의료기기안전정보원, Tel. 080-080-4183
- 본 제품은 '**일회용 의료기기**'이므로, '**재사용 금지**'
- 작성날짜 : 2023-06-12